


CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

Pro chvíle, na kterých záleží

Získejte náskok před šířením nemoci díky antigennímu testování

clintest.siemens-healthineers.com

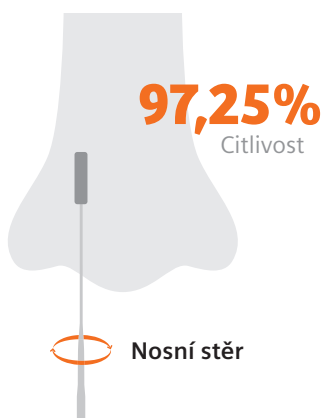

Určeno pro samotestování

Pomozte lidem chránit se navzájem a cítit se bezpečněji ve společnosti ostatních při každodenních činnostech i při mimořádných setkáních. S testem CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test můžete očekávat přesné a spolehlivé výsledky za pouhých 15 minut – ať už máte symptomy onemocnění COVID-19, nebo ne. Pro váš klid k tomu stačí rychlý, snadný a šetrný test výtěru z nosu.

Test je určen pro dospělé a děti od 12 let věku. Efektivně snižuje riziko šíření nákazy v rodinách, školách, na pracovištích i v dalších komunitách.

Specifikace

Doba testování do výsledku: 15 minut

Typ vzorku: stěr z přední části nosu

Velikost balení: 5 testů v krabičce

Uchování: pokojová teplota nebo chlazený (2–30 °C)

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

Detekovaný antigen: nukleokapsida

Obsah soupravy


Sada CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test obsahuje vše potřebné pro provedení testu:

- Testovací kazety
- Sterilní tampony
- Předplněné extrakční zkumavky a uzávěry s kapátkem
- Návod k použití
- Příbalový leták


* Test je schválen k samotestování osobami ve věku 12 let a staršími. Mladší děti může testovat dospělý podle pokynů.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Jak provést test

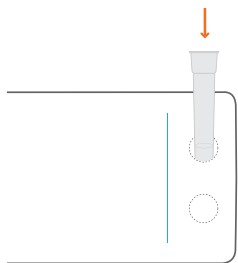


Vložte zkumavku do dodané pracovní stanice a sejměte fóliové víčko z horní části zkumavky.

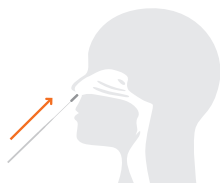

Tampon na dodané sterilní výtěrové tyčince opatrně zasuňte do jedné nosní dírky. Konec tamponu zasouvejte do hloubky 2–4 cm, dokud neucítíte odpor.




Výtěrovou tyčinkou v nosní dírce 5x zatočte. Opakujte i v druhé nosní dírce.

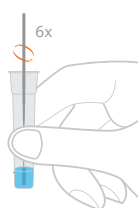


1 min

Výtěrovou tyčinkou zatočte více než 6x uvnitř zkumavky, a přitom ji přitiskněte na její dno a stěny. Nechte stát jednu minutu, a ještě několikrát tampon přitiskněte.

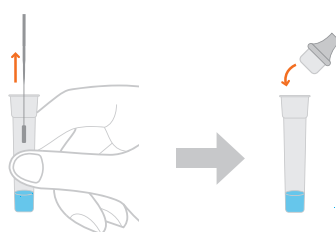

Poté výtěrovou tyčinku bezpečně vyjměte a zlikvidujte a na zkumavku se vzorkem nasadíte uzávěr s kapátkem.

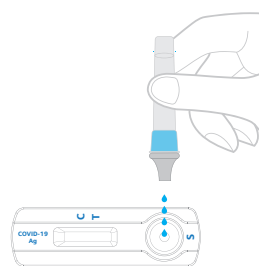

Položte kazetu na rovný povrch, označte ji a přidejte 4 kapky testovaného vzorku do jamky na vzorek. Výsledky budou připraveny za 15 minut.



15 min

Interpretace výsledků

Výsledek testu je uveden v testovací oblasti "T." Čára v oblasti "T" znamená, že byl detekován antigen SARS-CoV-2, a absence čáry znamená, že nebyl.

Čára by se měla vždy objevit v kontrolní oblasti "C." Pokud čára není přítomna, je výsledek testu neplatný.



Pokud je výsledek vašeho testu pozitivní, kontaktujte praktického lékaře.

Cena a dodání:

Obj. číslo: 11556491

Cena za test: 89 Kč bez DPH

Počet testů v balení: 170 krabiček po 5 testech (850 testů)

Cena celkem: 75 650 Kč bez DPH

Dodací lhůta: 5 pracovních dnů

Objednávka je možná pouze po celých kartonech, tj. po násobcích 850 testů.

Jak objednat?

Přes e-shop <http://diagnostika.siemens.cz/diagnostika/shop/Catalogue>

Případné dotazy posílejte na:

diagnostika.cz.team@siemens-healthineers.com

Kontakt:

Siemens Healthcare, s.r.o.
Healthcare Laboratory Diagnostics
Karásek 1767/1
621 33 Brno, Česká republika
siemens-healthineers.com/cz